




Användarinstruktion

Förberedelser

- 1**

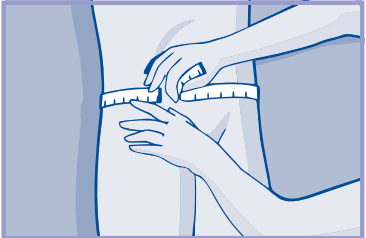

Attends kroppsformade skydd (Contours 6 -11) bör användas tillsammans med fixeringsbyxan Attends Stretch Pant. Det är viktigt att välja rätt storlek på byxan - mät höft och midje mått och utgå från det största måttet för att välja rätt storlek på byxan.

2




Ta på fixeringsbyxan, till precis ovanför knäna och vik upp linningen.

Öppna skyddet helt och se till att spärrskiktet ligger på utsidan och att det mjuka vita fodret hamnar mot huden.

Skålforma skyddet försiktigt på längden för att försäkra dig om att läckagebarriärerna står upp. Vidrör inte läckagebarriärerna - de kommer kupa sig och anpassa sig automatiskt med skyddet.


Fixering

- 3**

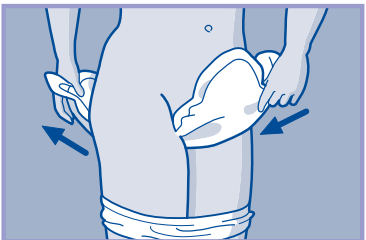


Placera skyddet mellan låren, börja om möjligt framifrån och bakåt med skyddets större del riktat bakåt.

4

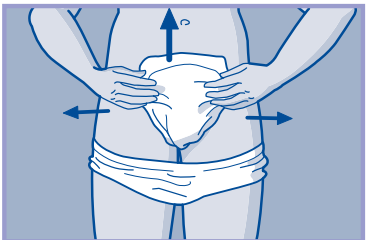


Jämna ut skyddet och dra upp fixeringsbyxan högt upp i grenen för optimal passform.
- 5**

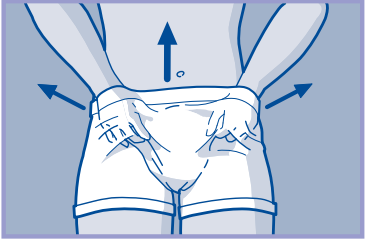

Justera fixeringsbyxan så att det täcker hela skyddet och kontrollera att spärrskiktet inte är vikt inåt.

6

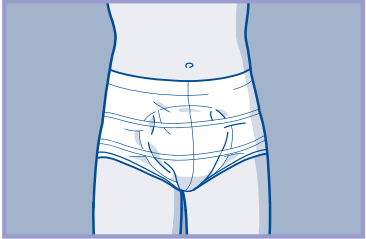

Fixeringsbyxan bör täcka skyddet. Till sist, kontrollera att både skyddet och fixeringsbyxan sitter tätt mot användaren.

Råd och Tips

Vid val av skydd

- Välj absorptionsnivå på skyddet utifrån en individuell bedömning av användarens behov.
- Välj storlek på fixeringsbyxan utifrån höftmått/midjemått.
- Tätt åtsittande underkläder kan bäras tillsammans med skydd upp till absorptionsnivå 5.
- Ju mindre skydd som används desto större värdighet och komfort för användaren.

Fixering

- Se till att du har vecklat ut skyddet helt innan fixering.
- Skaka inte skyddet.
- Placera den smala delen av skyddet framåt och den större delen av skyddet bakåt.
- Vik skyddet på längden och skålför det försiktigt.
- Vidrör inte läckagebarriärerna - de kommer kupa sig och anpassa sig automatiskt med skyddet.
- Skyddet placeras framåt för män och centrerat för kvinnor.
- Kontrollera att fixeringsbyxa i rätt storlek eller väl fungerande motsvarighet används.
- Om skyddet fixeras när användaren ligger ner bör samma tillvägagångssätt som vid stående fixering av skyddet följas.

Byte

- Kontrollera våtindikatorn - om våtindikatorn har försvunnit till mer än hälften av skyddets längd (60%) så behöver det bytas. Skyddet kan återförslutas om så inte är fallet.
- Rena och torra skydda kan återappliceras efter toalettbesök.
- Avlägsna använda skydd bakifrån om möjligt.
- Rengör huden enligt lokala föreskrifter. Rengör framifrån och bakåt.
- Undvik oljebaserade krämer om möjligt och använd aldrig puder eftersom det påverkar skyddets absorptionsförmåga vilket gör att urinen inte absorberas.

Vid läckage

- Följ stegen för fixering och bedömning noga.
- Kontrollera att du valt rätt storlek på fixeringsbyxan.
- Välj en högre absorptionsnivå endast när du kontrollerat att det inte handlar om ett fixeringsproblem eller efter klinisk bedömning.

Kassering av produkten

- Rulla ihop skyddet och släng det enligt gällande lokal avfallshänvisning.
- Spola inte ner skyddet i toaletten.
- Attends Stretch Pant kan återanvändas.

Attends® Contours



Attends Contours är testade och godkända av proDERM, institutet för dermatologisk forskning.

För mer information besök www.attends.se