


Attends® Slip Regular




Användarinstruktion


Föberedelser

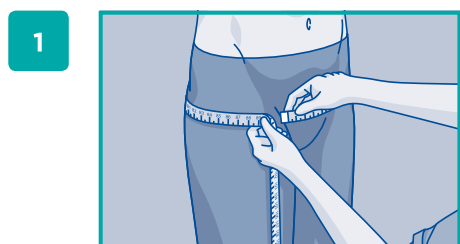

Mät höfter och midja och utgå från det större måttet för att välja rätt storlek på skyddet.

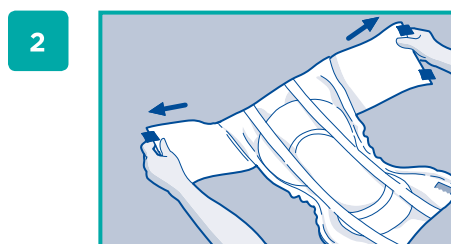

Öppna skyddet helt, placera änden med banden och kardborre mot ryggen och se till att banden är helt öppnade innan skyddet monteras. Kontrollera att spärrskiktet är vänt utåt och att det mjuka vita innerfodret hamnar mot huden.

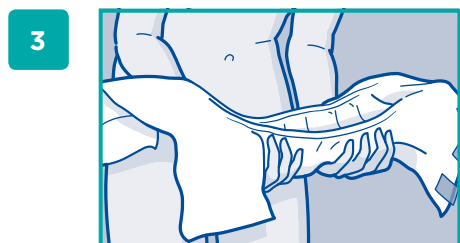


Vik och kupa skyddet på längden för att försäkra dig om att läckagebarriärerna står upp.


Fixering



Placera skyddet mellan benen så att det sitter tätt och komfortabelt i grenen på användaren. Använd våtindikatorn som hjälp för att justera och centrera skyddet.

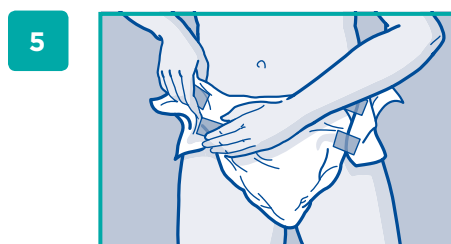

Dra försiktigt runt bandet till skyddets framsida och fäst med kardborren.

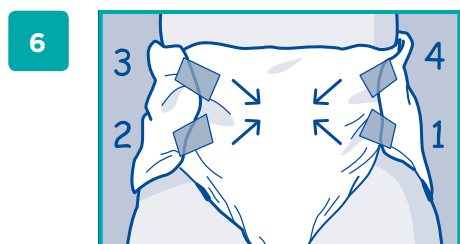

Fäst de nedre banden i riktning uppåt först för att få en tät passform i grenen. Fäst sedan de övre banden i riktning nedåt för att få en tät och bekväm passform.

Tips och Råd

Vid val av skydd

- Överväg att använda Attends figurformade skydd/byxor innan Slips då dessa ger en mycket högre diskretion.
- Välj rätt Slip genom att utgå från höft och midjemått och välj det största måttet.
- Välj absorptionsnivå utifrån mängden urin. För bästa möjliga komfort och diskretion bör du börja med ett lägre nummer på absorptions-skalan innan du byter till en produkt med en högre absorptionsnivå.
- Slips är en effektiv lösning när det finns risk för att användaren avlägsnar kroppsformade skydd.

Byte

- Kontrollera våtindikatorn - om våtindikatorn har försvunnit till mer än hälften av skyddets längd (60%) så behöver det bytas. Skyddet kan återförslutas om så inte är fallet.
- Återförslut och återanvänd skyddet vid toalettbesök om skyddet är rent och torrt.
- Fäst inte tejp på huden.
- Rengör huden enligt lokala föreskrifter. Rengör framifrån och bakåt.
- Undvik oljebaserade krämer om möjligt och använd aldrig puder eftersom det påverkar skyddets absorptionsförmåga vilket gör att urinen inte absorberas och huden utsatt för risk.

Fixering

- Se till att materialet i ljumskarna ligger på utsidan av skyddet.
- Håll tejp mot ryggen när skyddet monteras - då vet du att det sitter på rätt håll.
- Vid fixering bör de nedre banden först fästas i riktning uppåt och därefter de övre banden fästas i riktning nedåt. Detta för att ge en tät och komfortabel passform.
- Om skyddet fixeras när användaren ligger ner bör samma tillvägagångssätt som vid stående fixering av skyddet följas. Håll en hand bak på skyddet när du vänder användaren för att försäkra dig om att skyddet sitter kvar.
- Använd våtindikatorn för att centrera skyddet.

Vid läckage

- Följ stegen för fixering och bedömning noga.
- Kontrollera att du valt rätt storlek.
- Öka endast skyddets absorptionsnivå när du kontrollerat att det inte handlar om ett fixeringsproblem eller efter klinisk bedömning.

Kassering av produkten

- Rulla ihop skyddet och släng det enligt gällande lokal avfallshänvisning.
- Spola inte ner skyddet i toaletten.

Attends® Slip Regular



Attends Slip är testade och godkända av proDERM, institutet för dermatologisk forskning.

För mer information besök www.attends.se