


Attends® Cover-Dri




Användarinstruktion

Förberedelser

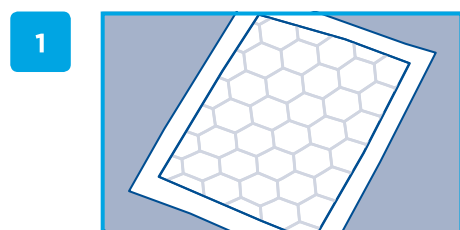


Öppna produkten helt och placera spärrskiktet nedåt mot sängen och de absorberande kuddarna uppåt mot huden.

Placering

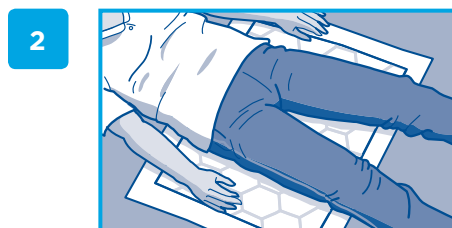


Placera underlägget under användaren.


Byte

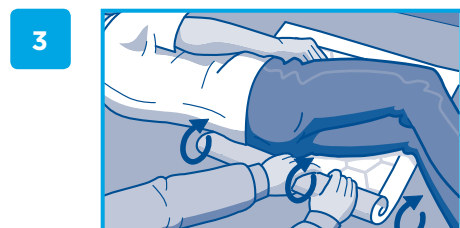


Vänd användaren till sidoläge och rulla ihop det använda underlägget in mot dennes rygg.

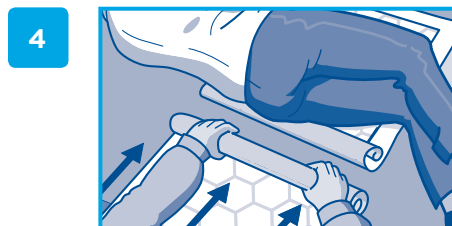

Veckla ut det nya underlägget och placera det mot användaren rygg.

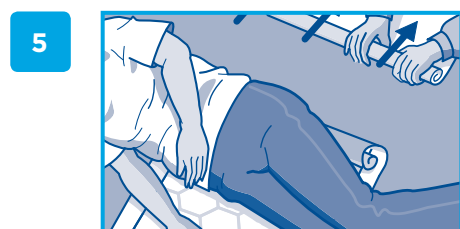

Vänd tillbaka användaren på underlägget och se till att skyddet ligger plant på sängen. Tag bort det använda skyddet.

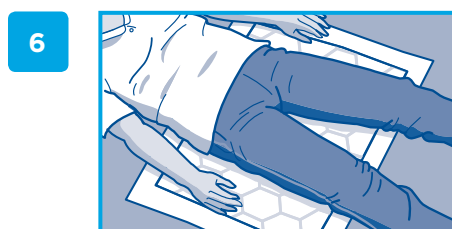

Lägg användaren i dennes ursprungliga position.

Tips och Råd

Välj rätt skydd

- Välj produktstorlek och absorptionsnivå utifrån den situation som skyddet används i.

Vid läckage

- Kontrollera att du använder rätt storlek och rätt absorptionsnivå på underlägget för den specifika situationen.

Kassering av produkten

- Rulla ihop skyddet och släng det enligt gällande lokal avfalls-hänvisning.
- Spola inte ner skyddet i toaletten.



Attends Cover-Dri är testade och godkända av proDERM, institutet för dermatologisk forskning.

För mer information besök www.attends.se