


# Attends® Soft



## Användarinstruktion



- 1** Tag bort skyddspappret på baksidan av skyddet.

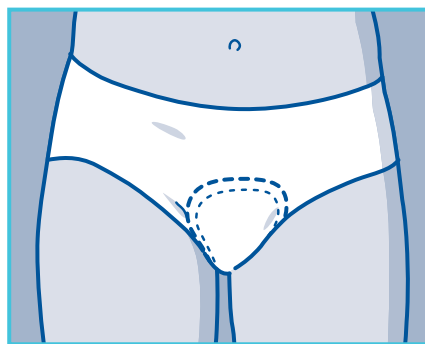

- 2** Placera skyddet i dina tätt åtsittande underkläder och kontrollera att fästytan inte hamnar mot huden.

## Tips och Råd

### Vid val av skydd

- Välj absorptionsnivå på skyddet utifrån en individuell bedömning av användarens behov.
- För bästa möjliga funktion rekommenderar vi att skyddet används tillsammans med tätt åtsittande underkläder.
- Ju mindre skydd som används desto större värdighet och komfort för användaren.

### Kassering av produkten

- Rulla ihop skyddet och släng det enligt gällande lokal avfallshänvisning.
- För Attends Soft 1 - 3+ kan du slänga det använda skyddet i styckförpackningen.
- Spola inte ner skyddet i toaletten.



Attends Soft är testade och godkända av proDERM, institutet för dermatologisk forskning.

För mer information besök [www.attends.se](http://www.attends.se)