


När du placerar Butterfly är den mer effektiv och bekväm om skyddets mitt är placerad hela vägen upp mellan skinkorna, och mitten av skyddet hamnar tätt mot analöppningen. Det kan krävas lite övning att lära sig placera Butterfly på det sätt som passar bäst för just dig.

## Så här använder du Butterfly

Följ instruktionerna nedan för maximal bekvämlighet och maximalt skydd.

### Steg 1 Vikning med fästytorna utåt.

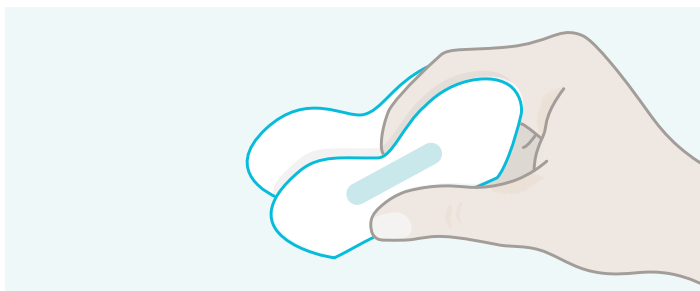

Tag bort pappret på baksidan och vik Butterfly på mitten med fästytorna på utsidan av vikningen.

Håll Butterfly så att de långa vingarna hamnar uppåt mot din rygg när den är rätt placerad.

### Steg 2 Placering av Butterfly.



För att enklast placera Butterfly rätt, rekommenderar vi dessa olika tekniker:

**1.** Luta dig lite framåt, sträck dig runt bakom ryggen likt när du torkar dig och placera skyddet mellan skinkorna.

**Eller 2.** Sträck dig mellan benen likt när du torkar dig framifrån och placera skyddet mellan skinkorna.


**Eller 3.** Sätt upp ena benet på toaletsitsen, sträck handen mellan benen och placera produkten mellan skinkorna.

Vik och placera Butterfly så att mitten av skyddet hamnar tätt mot analöppningen. Tryck fästytorna lätt mot huden med hjälp av ditt finger så att den sitter på plats.

## Tips och Råd

- När du börjar använda Butterfly kan du uppleva att det känns konstigt att ha någonting mellan skinkorna, men om skyddet är rätt placerat ska det kännas bekvämt. Om det inte är bekvämt, kontrollera att skyddets mitt är placerat tätt mot analöppningen.
- Fästytorna ska försiktigt fästas på huden så att det sitter säkert på plats och inte flytta sig och riskera att bli obekvämt att använda.
- När skyddet sitter på plats ska det sitta så högt upp mellan skinkorna att skyddets vingar inte träffas av urin när du kissar. Skyddet kan därmed sitta kvar vid urinering. Om skyddet blir vått när du kissar, försök placera det något högre upp mellan skinkorna, överväg att prova storlek S/M om du använder storleken L/XL.
- När Butterfly är förbrukad, ta försiktigt bort skyddet från huden genom att sträcka dig runt bakom ryggen och ta tag i en av de långa vingarna.

## Vanliga fel vid användning

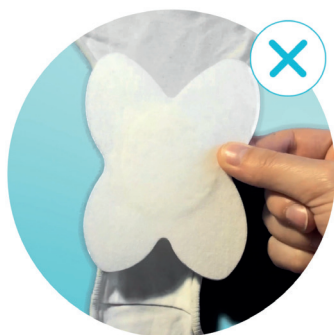

Fäst inte Butterfly i dina underkläder. Det ska alltid fästas direkt mot huden.



När Butterfly är korrekt placerad ska de "långa vingarna" peka uppåt mot din rygg och de "kortare vingarna" nedåt. Detta för en optimal komfort samt hygienisk och smidig borttagning efter användning.



Innan du applicerar produkten berör ej fästytorna och se till att de är utåt när skyddet viks.



Kasta ej skyddet i toaletten. Kassera i avsedd behållare alt papperskorg.