



Eezyflow by Anti-Snore Partner Sweden AB

Telefon: 08-636 50 30

Jacqueline.asker@eezyflow.com

annchristine.krook@eezyflow.com

www.eezyflow.com

FRIARE LUFTVÄGAR REDUCERAR SNARKNING

Målet med Eezyflow är att ge möjligheten att kunna sova skönt i en position liknande framstupa (stabil) sidoläge. Att jämföra med, vid första hjälpen när man hjälper en medvetslös person ligga i stabilt sidoläge. Som när narkosläkare ser till att andningsvägarna hålls öppna hos en medvetslös patient och de böjer huvudet bakåt för att vidga svalget, stänger munnen och skjuter underkäken framåt så att tungan inte så lätt faller bakåt. Dessa knep kan människor själva utnyttja mot snarkningarna. Man kan pröva hur tungt det känns att andas med huvudet framåtböjt i sängen istället för bakåtböjt. Eezyflow hjälper till med att hålla huvudet uppåt, lätt sträckt bakåt och med stängd mun. Avslappnad känns det riktigt behagligt.

EGENSKAPER & RÅD EEZYFLOW

1. CE-märkt medicinteknisk produkt. Tillverkning i Sverige & Danmark. Gjuts en och en i specialtillverkade formverktyg.
2. Viskoelastiskt tryckavlastande skum, formar sig av kroppsvärmen. Denna typ av skum används i vissa fall inom sjukvården för att förebygga trycksår hos patienter. Vanligt skum ger ett mottryck, det innebär att vid sömn kan man spänna sig omedvetet och få ont i tänder och käkar som följd. Eezyflow ger inget mottryck. Anpassat hudvänligt material, följer ÖKO-TEX standard 100.
3. Det tryckavlastande skummet och den patenterade inställbara möjligheten i höjdled gör att Eezyflow lämpar sig även som stödkrage och resekrage.
4. Inställbar i höjdled, en svensk patenterad teknisk lösning. Man kan även ibland behöva justera den i lite olika höjd då snarkningarna kan växla i svårighetsgrad från natt till natt, allt beroende på kroppsläge, nästäppa, trötthet eller alkoholintag.
5. Materialet är temperaturkänsligt, blir hårdare/stelare vid lägre temperaturer, mjukare vid högre temperaturer.
6. I bruksanvisning/handbok, sidan 10 finns instruktioner "hur man sätter på sig kragen". Överdraget av bomullstrikå är elastiskt så man måste hålla händerna rätt.
7. Slappna av och låt huvudet vila på sovkragen så blir det behagligt i både sittande och liggande läge. Du får lätt in fingrar och händer innanför sovkragen när du använder den, den ger med sig i alla lägen.
8. Överdrag av svensktillverkad bomullstrikå, 100 % ekologisk bomull. Fäst kardborrebanden innan tvätt. Torktumla inte.